

oxasil®**Инструкция по применению RU**

oxasil	EN ISO 4823	Цвета	Дозировка ^{*2}		Время смешивания с	Время обработки ^{*1} мин:с	Выдержка в ротовой полости мин:с
			BASE	Паста-активатор			
Soft Putty	Тип 0	Желтый	1 ложка (10,7 г/9,5 мл)	6–8 делений (0,32 г/0,29 мл)	30	1:00	4:00
			1 ложка (14,4 г/9,5 мл)	4–6 делений (0,21 г/0,19 мл)			
Putty	Тип 0	Желтый	12 делений (9,0 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)	30	1:00	4:00
			12 делений (8,6 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)			
Mucosa	Тип 2	Оранжевый	12 делений (8,6 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)	30	1:30	4:00
			12 делений (8,6 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)			
Light Flow	Тип 3	Синий	12 делений (8,5 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)	30	1:30	4:00
			12 делений (8,5 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)			
Very Light Flow	Тип 3	Синий	12 делений (8,5 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)	30	1:30	4:00
			12 делений (8,5 г/7,6 мл)	12 делений (0,65 г/0,59 мл)			

^{*1} При комнатной температуре 23°C (73°F), отн. влажности 50%.

Время обработки уменьшается при более высоких температурах и увеличивается при низких температурах.

Тип 0 = плотная консистенция

Тип 1 = высоковязкая консистенция

Тип 2 = консистенция средней вязкости

Тип 3 = низковязкая консистенция

Описание продукта

ПредCISIONНЫЙ оттискНЫЙ эластомерНЫЙ материал на основе силикона, конденсационно отверждаемый

Назначение

ОттискНЫЕ материалы oxasil: предНАЗНАЧЕНЫ для снятия слепков с использованием всех стандартных методик в зависимости от профессИонального опыта специалиста. К примеру, материалы могут использоваться при полном или частичном сохранении зубного ряда и при адентии для создания оттисков в целях изготовления полных, частичных протезов и кальки, а также репарации, временного протезирования или регистрации окклюзии.

Противопоказания

Запрещается использовать при наличии известной аллергии на компоненты.

Запрещается использовать у беременных и кормящих пациенток, а также у детей до 6 лет.

Запрещается использовать при наличии известной аллергии на олово или масло перечной мяты.

Побочные эффекты

В редких случаях продукт или один из его компонентов может вызвать аллергическую реакцию. При подозрении на возможность возникновения такой реакции можно получить информацию об ингредиентах, обратившись к изготовителю.

Взаимодействия

Для достижения наилучших результатов не рекомендуется использовать с другими силиконовыми материалами или активаторами.

При наличии существенных поднутрений или сильно отклоняющихся зубов в области получения слепка, необходимо выполнить соответствующую блокировку, особенно в случае применения материалов oxasil Putty и oxasil Soft Putty.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C (77°F).

Не использовать слепочные материалы oxasil после окончания срока годности.

Дату истечения срока годности

Утилизация
 и код партии **LOT** см. на контейнерах.