

# Vector® Fluid polish



Vector® Fluid polish является суспензией для полировки поверхностей зубов, зубных протезов и поверхности корней с использованием Vector®. При микроинвазивной и динамической ультразвуковой обработке эффективно и аккуратно удаляет биопленки, бляшки, бактерии, зубные конкременты, субгингивальные камнеобразования и эндотоксины.

Состав: Vector® Fluid polish содержит гидроксилапатит, диспергатор, сложный эфир PHВ и вспомогательные материалы.

Применение: Vector® Fluid polish является концентратом, предназначенным исключительно для использования с Vector®, автоматическим разбавляемым до желаемой концентрации. Тщательно соблюдать указания по применению Vector®.

Указания: Vector® Fluid polish обладает полирующе-абразивными свойствами. Не удалять колпачок пакета. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промыть водой. Не глотать.

Срок годности после вскрытия упаковки: 4 недели, не хранить при температуре ниже 5° С.

Дата вскрытия упаковки: записать на обратной стороне пакета (белое поле)

CE